

## Konservenanforderung Blutbank

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: 1EK Autor: Wo, C

**Probenmaterial (System BD Vacutainer)** Blutbank-EDTA-Röhrchen, 10 mL, lila Stopfen

**Probenmaterial (System Sarstedt Monovetten)** EDTA-Blutbank-Röhrchen, 9 mL, roter Stopfen

**Präanalytik:** Die eindeutige Kennzeichnung der Probe mit Name, Vorname und Geburtsdatum ist notwendig, sowie die Dokumentation von Patientennamen, Vorname und Geburtsdatum, Blutentnahmezeit, Transfusionsanamnese, Namen (leserlich) und Unterschrift d. blutabnehmenden Arztes/Ärztin auf dem Anforderungsschein oder in der elektronischen Anforderungsmaske.

**Einheit:** **Mindestprobenmenge** 9 mL

**Transport:**

**Methodik:**

### Erläuterungen

Bereitstellung von Erythrozytenkonzentraten mit Durchführung des Majortestes (Patientenserum bzw.-plasma und Spendererythrozyten).

Die Gültigkeit der Verträglichkeitsprobe beträgt 3 Tage.

Nach Ablauf der Gültigkeit muß die Verträglichkeitsprobe mit neuem Material wieder durchgeführt werden.

Siehe auch "Blutgruppenbestimmung".

## Referenzbereiche

## Konservenanforderung Blutbank

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: 1EK Autor: Wo, C