

Blut im Stuhl

We
STBL

Probenmaterial: Stuhlröhrchen

Methodik: Schnelltest , Mod. Gujak- Methode nach Greegor

Einheit:

Präanalytik: Stuhlproben von 3 aufeinander folgenden Tagen

Erläuterungen

Der Hämoccult-Test ist eine schnelle und einfache qualitative Methode zur Erkennung von okkultem Blut im Stuhl als möglichen Hinweis auf eine Erkrankung des Verdauungstraktes einschließlich Darmkrebs.

Erkennt man sichtbares Blut am Stuhl (z. B. bei blutenden Hämorrhoiden oder während der Menstruation) sollten keine Stuhlproben entnommen werden.

CAVE:

-Vitamin C kann zu falsch negativen Ergebnissen führen, da Ascorbinsäure reduzierend wirkt, daher 3 Tage vor dem Test auf Medikamente und Säfte mit Vitamin C - Zusatz verzichten.

-Eisen und Jod können zu falsch positiven Ergebnissen führen, daher diese Substanzen 3 Tage vor dem Test nicht einnehmen und Lebensmittel mit hohem Eisen- oder Jodgehalt (rohes Fleisch, Meerrettich, Broccoli, Blumenkohl, Leber, Rettich, Radieschen, Bananen, Kirschen) 3 Tage vorher meiden.

-Azetylsalicylsäure, Glukokortikoide, nichtsteroidale Antiinflammatorika/Antirheumatika oder Cumarin-Derivate können zu gastrointestinalen Blutungen führen und somit einen positiven Test hervorrufen. Im Einzelfall ist ein Absetzen abzuwägen.

Referenzbereich

negativ