

SARS-CoV-2 Antigen-Nachweis Nasen/Rachen-Abstrich

Analysencode: COV19G Autor: C

Probenmaterial (BD Vacutainer):**Probenmaterial (Sarstedt Monovetten):****Präanalytik:** Naso-Pharyngeal Entnahmetupfer mit Virustransportmedium verwenden oder Abstrichtupfer mit AMIES Transportmedium, z.B. eSwab.**Einheit:** **Mindestprobenmenge:****Transport:****Methodik:** Molekularbiologischer RNA-Nachweis

Erläuterungen

Immunchromatographischer Test zum qualitativen Nachweis von spezifischen SARS-CoV-2 Antigenen im humanen Nasopharynx.

Dieser Test dient zum Nachweis von Antigenen des SARS-CoV-2-Virus bei Personen mit Verdacht auf Covid-19.

Sensitivität hierfür lt. Hersteller 96% bei symptomatischen Patienten.

Ein positives Ergebnis des Tests muß gemäß RKI-Richtlinien immer durch eine PCR bestätigt werden.

Ein negatives Ergebnis kann auftreten, wenn die Antigenkonzentration unterhalb der Nachweisgrenze des Tests liegt oder die Probe nicht ordnungsgemäß entnommen oder transportiert wurde.

Referenzbereiche

negativ

29.10.2020 Dr. O. Colhoun

SARS-CoV-2 Antigen-Nachweis Nasen/Rachen-Abstrich