

Syph.AK IgG+M Serum

Analysencode: SYPIGS Autor:

Probenmaterial (System BD Vacutainer) Serumröhrchen, gelb-oranger Stopfen, 10 mL**Probenmaterial (System Sarstedt Monovetten)** Serumröhrchen, hellbrauner Stopfen, 10 mL**Präanalytik:****Einheit:** Mindestprobenmenge**Transport:****Methodik:****Erläuterungen**Enzymimmunoassay zum qualitativen Nachweis spezifischer Antikörper gegen *Treponema pallidum*.

Ein negativer Befund schließt eine Infektion mit hoher Wahrscheinlichkeit aus.

Gang der Untersuchung im Labor:

Tp-Suchtest (Syphilis-AK IgG/IgM im Serum)

I	I
I	I
negativ:(1)	positiv
	I
	I
	IgG-Bestätigungstest (Immunoblot)
	IgM-Bestätigungstest (Immunoblot)
	VDRL (Verlauf)

Interpretation (Serum)

S.-AK IgG/M	IgM Imm.blot	VDRL
negativ	negativ	negativ: (1)
positiv	positiv	negativ: (2)
positiv	positiv	positiv: (3)

(1)

kein Anhalt für eine Infektion, ggf. Kontrolle in 2-3 Wochen

(2)

frühe Primärsyphilis, Klinik?

(3)

behandlungsbedürftige Lues

unter Berücksichtigung der Behandlungsanamnese auch ausgeheilte Lues möglich

Referenzbereiche

negativ

Syph.AK IgG+M Serum

Analysencode: SYPIGS Autor: